

balto®
TUTORI ORTOPEDICI PER ANIMALI



**I MIGLIORI SUPPORTI
PER RITROVARE LA SUA VITALITÀ**

HAND MADE IN ITALY

LA QUALITÀ BALTO SI FA SPAZIO



**Cresce la fiducia nel brand,
crescono gli spazi aziendali
per ricerca e produzione.**

Balto: un brand **di riferimento nel campo dell'ortopedia veterinaria**, vero e proprio benchmark nella produzione di tutori per animali oltre che perfetto esempio di azienda handmade in Italy, capace di unire ricerca, creatività, rigore e precisione artigianale.

Una realtà in costante crescita, nella gamma prodotti, nella presenza sul mercato, nella scelta dei veterinari e del pubblico, crescita che trova oggi corrispondenza nello sviluppo di nuovi spazi aziendali: una struttura che concentra produzione, logistica e polo tecnico-scientifico per la ricerca sulla cura e il benessere animale e lo sviluppo del prodotto. Uno spazio funzionale, di lavoro e rappresentanza, in grado di ospitare in un contesto accogliente gli incontri e gli eventi destinati agli specialisti della professione veterinaria.

balto®
TUTORI ORTOPEDICI PER ANIMALI

JOYVET
s.r.l.

Da sempre fedeli alla nostra missione: il benessere dell'animale prima di tutto.

Scrupolosi, ricchi del know-how acquisito nel settore ortopedico, costantemente aggiornati: questo ciò che siamo. **Artigianalità, cura del dettaglio, unicità del prodotto, made in Italy:** questi i valori in cui crediamo. Ma tutto nasce dalla passione.

La passione per i nostri cani e gatti, che vogliamo vedere sempre in salute, pronti a correre e saltare assecondando la loro natura e il desiderio di manifestarci la loro gioia attraverso il movimento. **La passione per ciò che progettiamo e realizziamo**, che ci spinge a metterci costantemente alla prova, a migliorare la performance dei nostri prodotti, a cercare soluzioni sempre più avanzate che fanno la differenza in termini di comfort per i nostri animali e di praticità d'uso per chi se ne prende cura.

Una passione integrata dall'esperienza, dalla competenza frutto di anni di lavoro e ricerca, dalla collaborazione con chi si occupa della salute animale in modo scientifico ed autorevole, veterinari e ortopedici veterinari.



Anatomia di un tutore Balto: dai materiali certificati alle finiture a mano.

Pensiamo che i nostri compagni a quattro zampe meritino **tutori ortopedici in grado di garantire la miglior cura con la massima libertà**, contenendo la parte interessata senza inibire il movimento. Ausili che uniscono ergonomia, personalizzazione e praticità: **tutori dalle altissime prestazioni che realizziamo in Italia**, controllando l'intera filiera dal taglio dei semilavorati al confezionamento sartoriale affidato a personale specializzato.

HAND MADE IN ITALY

COMPONENTI METALLICHE.

Una prima fase della lavorazione riguarda la creazione delle stecche, piccole piastre di metallo sagomate utilizzate per le diverse funzioni di supporto, bloccaggio e sostegno. Tutte le stecche all'interno dei nostri tutori sono tagliate a laser all'interno dell'azienda, sottoposte a trattamento di vibrofinitura per smussarne gli spigoli e infine asciugate con tutolo di mais, granuli abrasivi naturali, utilizzati anche per la sabbiatura e granigliatura delle superfici.

RIVESTIMENTI: TAGLIO, CUCITURA E CONFEZIONAMENTO.

Parallelamente vengono preparati tutti i semilavorati in tessuto, a iniziare dalla fustellatura, ovvero dal taglio dei singoli elementi per mezzo di apposite trince. Successivamente, gli operatori specializzati si occupano di cucire e rifinire a mano ogni singolo prodotto fino al confezionamento.





TESTA / COLLO

BT NECK

COLLARE RIGIDO
ORTOPEDICO



BT NECK è un tutore ortopedico che nasce per aiutare cani e gatti con problemi alle vertebre cervicali, schiacciamento delle stesse, problemi neurologici e problemi di ernie. L'effetto compressivo del tutore garantisce anche una trazione del collo e lo protegge in caso di ferite. Utile anche nei casi di disturbi ossessivo-compulsivi. La funzione secondaria è quella di essere una valida alternativa al collare elisabettiano, che impedisce al cane di mordere la regione del corpo su cui è stato praticato un intervento. In questo modo non potrà rimuovere i punti di sutura o ingerire prodotti medicali applicati sulla ferita, proteggendo le zone del torace, del ventre, dei fianchi e rendendo difficile il raggiungimento delle zone vicino alla zampa anteriore (da gomito a spalla). Anche la zona perianale coinvolta da eventuali interventi di asportazione di ghiandole perianali, fistole o altro, risulta protetta.

ISTRUZIONI PER PRENDERE LE MISURE



Prendere la misura della circonferenza del collo del cane con un metro da sarta (misurare al centro del collo).



TAGLIE	CIRCONFERENZA COLLO
XXS	misura per Gatti e Chihuahua
XS	25-35 cm
S	35-45 cm
M	45-55 cm
L	55-65 cm
XL	65-75 cm

**Attenzione: per determinare la taglia del tutore prendere le misure come specificato.*



VANTAGGI

Maggiore praticità nell'applicazione e la minore invasività rispetto al collare elisabettiano (il cane può mangiare e bere senza costrizioni).



CARATTERISTICHE

- ▶ Tessuto traspirante ed impermeabile (in caso di pioggia).
- ▶ Il tutore può essere utilizzato sia nel pre che nel post operatorio.
- ▶ Vestibilità.
- ▶ Lavabile a mano.



BT NECK ECO

COLLARE
ANTI-LECCAMENTO



BT NECK ECO nasce come alternativa al classico collare di Elisabetta, lo supera con prestazioni d'eccellenza unendo efficacia e massimo comfort. La sua funzione è quella di evitare che il cane o il gatto possano mordere e quindi rimuovere punti di sutura a seguito di un intervento chirurgico. Utile anche nei casi di disturbi ossessivo-compulsivi. Il collare è realizzato in vellutino nero traspirante, dove all'interno è presente un materiale più rigido la cui funzione è quella di impedire all'animale di ruotare il collo per raggiungere le eventuali ferite. Nel cane evita il leccamento delle zone del torace, del ventre, dei fianchi rendendo difficile il raggiungimento delle zone vicino alla zampa anteriore (da gomito a spalla). Anche la zona perianale, coinvolta da eventuali interventi di asportazione di ghiandole, fistole o altro, risulta protetta. Nel gatto è utile esclusivamente a seguito di interventi di sterilizzazione eseguiti sia su maschi che su femmine.



ISTRUZIONI PER PRENDERE LE MISURE



Prendere la misura della circonferenza del collo del cane con un metro da sarta (misurare al centro del collo).

TAGLIE	CIRCONFERENZA COLLO
XXS	misura per Gatti e Chihuahua
XS	25-35 cm
S	35-45 cm
M	45-55 cm
L	55-65 cm
XL	65-75 cm

**Attenzione: per determinare la taglia del tutore prendere le misure come specificato.*



VANTAGGI

Maggiore praticità nell'applicazione e la minore invasività rispetto al collare elisabetiano (il cane può mangiare e bere senza costrizioni).



CARATTERISTICHE

- Tessuto traspirante ma non impermeabile.
- Il tutore può essere utilizzato sia nel pre che nel post operatorio.
- Vestibilità.
- Lavabile a mano.



NOTE

- Questo collare **ha puramente una funzione anti-leccamento.**

Nel caso in cui l'animale soffra di problemi cervicali, schiacciamento delle vertebre, problemi neurologici, il tutore più idoneo è il collare rigido ortopedico BT NECK per cani e per gatti e cani di razza Chihuahua o simili.

- Il collare BT NECK ECO **non è indicato per le razze di levrieri e bulldog.**

Il collo lungo dei primi non permette una stabilità del tutore, mentre il collo corto e tozzo del bulldog non permette l'applicazione di collari.





BT SPLINT

TUTORE PER
LASSITÀ DEL CARPO



È studiato per sostenere l'articolazione radio-carpica, carpo-metacarpica e tarso-metatarsica, sia delle zampe anteriori che di quelle posteriori. Per cani che soffrono di patologie come: iperestensione o iperflessione del carpo o del tarso, distorsioni legamentose, stiramenti, infrazioni ossee di lieve entità risolvibili qualora il trattamento conservativo sia preferibile all'intervento chirurgico. Nel caso di utilizzo sulla zampa anteriore, consigliamo anche BT JOINT, in quanto il suo impiego sulla zampa sana aiuterà il cane a compensare meglio il carico che la stessa deve sopportare a causa del deficit dell'altra zampa. Se BT SPLINT è utilizzato per la zampa posteriore, consigliamo l'utilizzo di BT JOINT per entrambe le zampe anteriori. Una volta montato il tutore attorno alla zampa del cane non è necessario che i 2 bordi bianchi siano chiusi attorno alla zampa fino a toccarsi, in quanto **la chiusura del tutore è determinata dalle fasce blu e l'azione di tutoraggio è data dalla stecca presente nella parte posteriore del tutore.**



VANTAGGI

Efficacia, praticità, ergonomia: il tutore per lassità BT SPLINT riunisce tutto questo. La stecca metallica in resistente materiale modellabile inserita all'interno del tessuto, segue la parte posteriore dell'avambraccio fino ad accogliere il cuscinetto plantare stabilizzando l'area interessata e permettendo al cane un buon movimento. Ideale anche come protezione per bendaggi inseriti all'interno, permette tempi di recupero più rapidi.



CARATTERISTICHE

- ▶ La taglia XXS e XS va bene anche per i gatti.
- ▶ Stecca metallica in resistente materiale modellabile.
- ▶ Il tutore può essere utilizzato sia nel pre che nel post operatorio.
- ▶ Tessuto traspirante.
- ▶ Vestibilità.
- ▶ Lavabile a mano.
- ▶ Nel tutore è già inclusa la stecca.



NOTE

- ▶ Il diretto contatto con il terreno può danneggiare il tutore, quindi per garantirne l'integrità, durante l'utilizzo è necessario proteggerlo facendo indossare al cane anche una scarpetta o una calza protettiva, acquistabile in qualsiasi negozio di animali.



A



B

TAGLIE	PESO	LUNGHEZZA A-B	RAZZE ESEMPIO*
XXS	fino a 2 kg	9,5 cm	Chihuahua, Volpino Di Pomerania
XS	fino a 5-7 kg	13 cm	Jack Russel , Shih Tzu
S	fino a 15 kg	16 cm	Cocker Spaniel, Barboncino Medio
M	fino a 25-30 kg	22 cm	Border Collie, Setter, Pointer Inglese
L	oltre 30 kg	30 cm	Pastore Tedesco, Golden Retriever, Rottweiler

*Attenzione: le misure del peso sono puramente indicative, alcune razze possono non coincidere con le taglie indicate, pertanto fare anche riferimento alle dimensioni del tutore per la scelta corretta. Se utilizzato per le zampe posteriori, scegliere la taglia inferiore rispetto ai pesi indicati (ad esempio: se il cane pesa 27 kg, per la zampa anteriore scegliere la taglia M, per la zampa posteriore scegliere la taglia S).

BT JOINT

FASCIA COMPRESSIVA
PER CARPO



Viene impiegato nelle patologie che provocano infiammazioni nel carpo e che causano dolore, zoppia, difficoltà di movimento. È un ottimo protettivo per bende e cerotti nella cura di ferite chirurgiche o piaghe da leccamento. Una volta montata la fascia attorno alla zampa del cane non è necessario che i due bordi bianchi siano chiusi attorno alla zampa fino a toccarsi, in quanto la chiusura della fascia è determinata dalle fasce blu e l'azione di tutoraggio avviene grazie alle stecche presenti nella parte posteriore della fascia.



VANTAGGI

Scegliere l'eccellenza della fascia carpale BT JOINT è garantire alla parte lesa del cane massima stabilità con conseguente diminuzione del gonfiore. BT JOINT favorisce l'equilibrio tra i gruppi muscolari della zona carpale agevolando le funzionalità motorie e quindi, il processo di guarigione.




CARATTERISTICHE

- ▶ La fascia può essere utilizzata sia nel pre che nel post operatorio.
- ▶ Tessuto traspirante.
- ▶ Vestibilità.
- ▶ Lavabile a mano.



NOTE

BT JOINT non è un tutore correttivo, nel caso di lassità del carpo o del tarso, o di lesioni dei legamenti che causano iperestensione o iperflessione scegliere il BT SPLINT. Scegliere BT BONE nei casi di iperestensione grave del carpo.

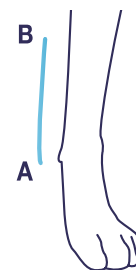

TAGLIE	PESO	LUNGHEZZA A-B	RAZZE ESEMPIO*
XS	4-8 kg	7 cm	Jack Russel , Shih Tzu
S	8-25 kg	9 cm	Border Collie, Barboncino Medio
M	25-35 kg	12 cm	Setter, Pointer Inglese
L	35-50 kg	14 cm	Pastore Tedesco, Golden Retriever
XL	oltre 50 kg	16 cm	San Bernardo, Alano, Terranova

*Attenzione: le razze suggerite sono puramente indicative, per determinare la taglia della fascia prendere a riferimento i pesi indicati. La misura A - B indica la lunghezza della fascia.

BT BONE

TUTORE
PER FRATTURE




Il tutore BT BONE è l'alternativa alle comuni steccature o ingessature utilizzate per traumi causati dalla frattura della zampa anteriore compresa tra radio-ulna e radio-carpo. È dotato di tre stecche rigide: una stecca fissa inserita in una tasca posta centralmente sulla parte posteriore e due stecche laterali, dotate di velcro per permettere il miglior posizionamento a seconda delle necessità. L'impiego delle stecche garantisce il sostegno e la stabilizzazione dell'arto fratturato per il periodo d'impiego previsto dal proprio Veterinario.

Il tutore è realizzato in materiale traspirante che permette un utilizzo giornaliero in quanto evita piaghe da sudorazione o vesciche. In caso di utilizzo di BT BONE, consigliamo di abbinare anche BT JOINT, in quanto il suo impiego sulla zampa sana aiuterà il cane a compensare meglio il carico che la stessa deve sopportare a causa del deficit della zampa fratturata. Una volta montato il tutore attorno alla zampa del cane non è necessario che i 2 bordi bianchi siano chiusi attorno alla zampa fino a toccarsi, in quanto la chiusura del tutore è determinata dalle fasce blu e l'azione di tutoraggio è data dalle tre stecche presenti nel tutore.



CARATTERISTICHE

- ▶ Tessuto traspirante
- ▶ Vestibilità.
- ▶ Lavabile a mano.

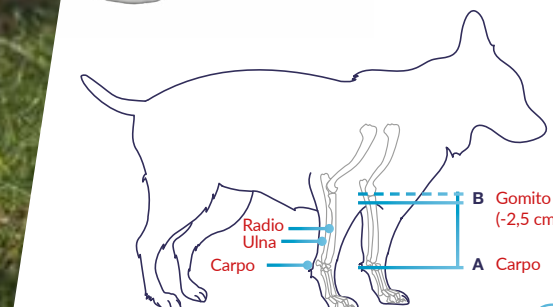

ISTRUZIONI PER PRENDERE LE MISURE

Con un metro da sarta, misurare la lunghezza della zampa anteriore (dal carpo a 2,5 cm sotto il gomito) e confrontare la tabella.

TAGLIE	PESO	LUNGHEZZA A-B
XS	5-10 kg	8-10,5 cm
S	10-15 kg	11-14 cm
M	15-25 kg	14,5-18 cm
L	25-45 kg	18,5-21 cm
XL	45-55 kg	22-27 cm
XXL	Oltre 55 kg	oltre 27 cm

*Attenzione: i pesi indicati sono puramente indicativi. In caso di dubbio, affidarsi esclusivamente alle misure in cm riportate.



BT SOFT

TUTORE
PER GOMITO



Ecco il compagno fedele per la tutela del gomito del cane. **BT SOFT è pensato per proteggere l'animale in caso di igromi, piaghe, calli al gomito e borsiti.**

Il tutore è utile anche in caso di patologie come artriti o artrosi o displasia del gomito. Infatti l'effetto compressivo del materiale di cui è composto aumenta la pressione sanguigna nella zona e di conseguenza la temperatura, riducendo così il dolore provocato dalle patologie. Con la sua azione di tutoraggio compatta la parte lesa e risulta estremamente efficace anche per contenere eventuali medicazioni applicate sulla cute del cane nel periodo post-operatorio.

TAGLIE	PESO	RAZZE ESEMPIO E PESI*
S	4-10 kg	Jack Russel, Bulldog Francese
M	12-18 kg	Cocker Spaniel, Barboncino
L	20-45 kg	Border Collie, Pastore Tedesco, Golden Retriever
XL	Oltre 45 kg	San Bernardo, Alano, Terranova

**Attenzione: le razze suggerite sono puramente indicative, per determinare la taglia del tutore prendere come riferimento i pesi indicati.*



VANTAGGI

Con la sua imbottitura sostituibile, il tutore per gomito BT SOFT unisce alte performance col massimo comfort. Usato nel periodo post-operatorio, favorisce il recupero con una convalescenza più serena.



CARATTERISTICHE

- ▶ Il tutore può essere utilizzato sia nel pre che nel post operatorio.
- ▶ Tessuto traspirante.
- ▶ Vestibilità.
- ▶ Lavabile a mano.
- ▶ All'interno della confezione sono presenti due cuscini di ricambio.
- ▶ Fascia accorciabile.



BT SOFT PLUS

TUTORE
PER GOMITO DOPPIO



Con BT SOFT PLUS, proteggere il gomito del tuo amico a quattro zampe è davvero più facile. Il tutore interviene in caso di igromi, piaghe e calli al gomito e borsiti.

BT SOFT PLUS è utile anche in caso di patologie come artriti o artrosi o displasia del gomito. Infatti l'effetto compressivo del materiale di cui è composto aumenta la pressione sanguigna nella zona e di conseguenza la temperatura, riducendo così il dolore provocato dalle patologie. È efficace anche per contenere medicazioni post-operatorie a diretto contatto con la cute, come ad esempio in caso di interventi chirurgici per cani affetti da infiammazione bilaterale sterile della borsa olecranica.

TAGLIE	PESO	RAZZE ESEMPIO*
S	4-10 kg	Jack Russel, Bulldog Francese
M	12-18 kg	Cocker Spaniel, Barboncino
L	20-45 kg	Border Collie, Pastore Tedesco, Golden Retriever
XL	oltre 45 kg	San Bernardo, Alano, Terranova

**Attenzione: le razze suggerite sono puramente indicative, per determinare la taglia del tutore prendere come riferimento i pesi indicati.*



VANTAGGI

Una grande libertà di movimento per correre veloci verso una pronta guarigione: ecco la promessa di un tutore dalle eccellenti prestazioni come BT SOFT PLUS. La comoda imbottitura sostituibile unisce praticità, comodità e un'ottima stabilità. BT SOFT PLUS è un alleato fedele per la salute del tuo cane.



CARATTERISTICHE

- ▶ Il tutore può essere utilizzato sia nel pre che nel post operatorio.
- ▶ Tessuto traspirante.
- ▶ Vestibilità.
- ▶ Lavabile a mano.
- ▶ All'interno della confezione sono presenti due cuscini di ricambio.



BT LUX

TUTORE PER LA STABILIZZAZIONE DELLA SPALLA



Il tutore BT LUX è pensato per limitare la totale abduzione delle spalle del tuo amico a 4 zampe. Viene utilizzato sia in caso di problematiche lievi (es. infiammazioni) sia in caso di patologie della spalla per le quali è necessario limitare l'abduzione ed il movimento dell'articolazione. Viene utilizzato inoltre nel post-operatorio per favorire il graduale recupero.

- È utile in caso di:
- ▶ instabilità dell'articolazione della spalla;
 - ▶ displasia;
 - ▶ lassità;
 - ▶ lussazione;
 - ▶ infiammazione.

All'interno del tutore, all'altezza delle spalle, è presente del materiale rigido per aumentare la compressione e la limitazione del movimento delle articolazioni.



VANTAGGI
BT LUX accompagna il tuo cane nella ripresa delle funzionalità motorie, in modo graduale.
La comoda imbottitura unisce praticità, comodità e un'ottima stabilità.



- CARATTERISTICHE**
- ▶ Il tutore comprime entrambe le spalle contemporaneamente.
 - ▶ Tessuto traspirante.
 - ▶ Vestibilità.
 - ▶ Lavabile a mano.

TAGLIE	PESO	RAZZE ESEMPIO*
XXS	2-5 kg	Chihuahua, Pincher, Pechinese
XS	5-10 kg	Jack Russel, Bulldog Francese
S	10-19 kg	Cocker Spaniel, Barboncino
M	20-49 kg	Pastore Tedesco, Golden Retriever
L	50-80 kg	San Bernardo, Terranova

*Attenzione: le razze suggerite sono puramente indicative, per determinare la taglia del tutore prendere come riferimento i pesi indicati.



SCHIENA / BACINO

BT UP


SOSPENSORE POSTERIORE



Quando la colonna e le zampe posteriori non reggono come dovrebbero, BT UP è il sostegno che serve. Il sospensore è il sostegno ideale per il cane che soffre di problematiche e patologie come artrite, artrosi, displasia dell'anca, paralisi o semiparalisi delle zampe posteriori. L'ausilio è un valido aiuto che permette all'animale di deambulare con più facilità, continuando così a condividere assieme al padrone i gesti quotidiani come passeggiare e salire le scale. L'efficacia di BT UP è riconosciuta anche da veterinari che lo impiegano in fisioterapia e nei programmi di riabilitazione.

TAGLIE	CIRC.	RAZZE ESEMPIO E PESI*
XS	15-20 cm	Jack Russel, Shih Tzu (5-10 kg)
S	25-30 cm	Cocker Spaniel, Barboncino Medio (10-15 kg)
M	30-35 cm	Border Collie, Setter, Dalmata (15-30 kg)
L	40-45 cm	Pastore Tedesco, Golden Retriever, Rottweiler (28-50 kg)
XL	50-55 cm	San Bernardo, Alano, Terranova (oltre 50 kg)

**Attenzione: le razze e i pesi suggeriti sono puramente indicativi, per determinare la taglia del tutore prendere le misure come specificato.*

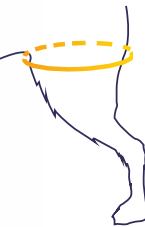

ISTRUZIONI PER PRENDERE LE MISURE

Prendere la circonferenza della zampa all'altezza dell'inguine con un metro da sarta.



VANTAGGI

Grande praticità, garantita dalle maglie regolabili in altezza; ottima stabilità, grazie all'utilizzo di due stecche rigide laterali inserite in apposite tasche; massimo comfort, ottenuto con l'impiego di materiali d'eccellenza completamente traspiranti: tutto questo è la forza di BT UP. E in più, il suo design permette all'animale di espellere le proprie deiezioni solide e liquide senza sporcarsi.



CARATTERISTICHE

- ▶ Il tutore può essere utilizzato sia nel pre che nel post operatorio.
- ▶ Stecche rigide laterali per una maggior stabilità.
- ▶ Traspirante.
- ▶ Lavabile a mano.
- ▶ Regolabile in altezza.
- ▶ Fascia accorciabile.



BT BODY LIFT

CORPETTO INTEGRALE
CON MANIGLIA



Il corpetto BT BODY LIFT ha due funzioni specifiche.

1) È indicato per cani con **problemi di deambulazione a seguito di traumi, patologie o paralisi**.
È adatto anche per cani con **difficoltà motorie**.

2) È indicato anche per **cani con problemi alla colonna vertebrale**.

Le 2 stecche rigide, inserite nelle 2 tasche laterali, hanno la funzione sia di stabilizzare il supporto durante l'utilizzo, sia quella di comprimere la zona prossimale alla colonna vertebrale nei casi di patologie alla stessa, mantenendola in trazione (ad esempio patologie neurologiche).



VANTAGGI

BT BODY LIFT è realizzato in materiale morbido, lavabile e traspirante.

La maniglia regolabile in altezza è resistente e consente di sollevare anche cani con pesi importanti.

La maniglia è imbottita per permettere al padrone di sostenere il cane senza stressare la mano.

Il supporto è studiato per permettere al cane di espellere le proprie deiezioni solide e liquide anche mentre viene indossato, senza sporcarlo in quanto le parti intime vengono lasciate libere. Sia la maniglia che le stecche sono removibili.



CARATTERISTICHE

► Tessuto traspirante.


► Vestibilità.

► Lavabile a mano.

► Maniglia regolabile in altezza.

► Fasce accorciabili.

► Stecche rigide laterali per una maggior stabilità.

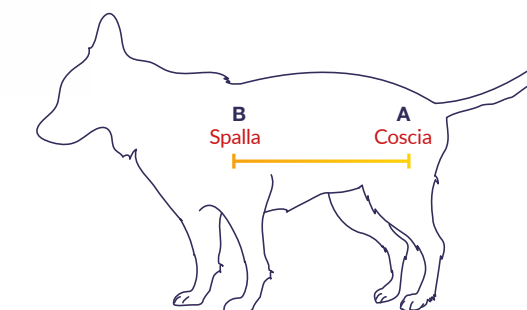

ISTRUZIONI PER PRENDERE LE MISURE

Misurare la distanza in cm dal centro della spalla al centro della coscia e verificare la tabella.



TAGLIE	DIMENSIONE A-B	RAZZE ESEMPIO E PESI*
XS	25-32 cm	Jack Russel, Shih Tzu (5-10 kg)
S	33-39 cm	Cocker Spaniel, Barboncino Medio (10-15 kg)
M	40-49 cm	Border Collie, Setter, Pointer Inglese (15-30 kg)
L	50-59 cm	Pastore Tedesco, Golden Retriever, Rottweiler (28-50 kg)
XL	oltre 60 cm	San Bernardo, Alano, Terranova (oltre i 50 kg)

**Attenzione: le razze suggerite sono puramente indicative, per determinare la taglia del tutore prendere come riferimento i pesi indicati.*


BT LIFE

TUTORE PER
LA DISPLASIA DELL'ANCA



Il tutore viene utilizzato per aiutare cani affetti da displasia dell'anca, riducendo il dolore grazie alla compressione bilaterale che esercita sulle anche. È efficace per tutti i gradi di displasia, compreso il grado E (il più grave).

Risulta utile anche per altre patologie (ad esempio artrosi all'anca). Ottimo come alternativa all'intervento chirurgico nel caso in cui il cane non possa essere operato. È realizzato in materiale sia contenitivo che compressivo, traspirante e lavabile. BT LIFE viene fornito completo di 2 maniglie regolabili in lunghezza che si possono agganciare al tutore in caso di necessità, con le quali si può aiutare il cane a salire o scendere dalla macchina o dalle scale. Le maniglie possono essere poi rimosse se non necessarie.

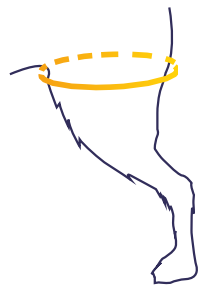

ISTRUZIONI PER PRENDERE LE MISURE

Prendere la circonferenza della zampa all'altezza dell'inguine con un metro da sarta.



TAGLIE	CIRCONFERENZA COSCIA	RAZZE ESEMPIO E PESI*
XS	15-20 cm	Jack Russel, Shih Tzu (5-10 kg)
S	25-30 cm	Cocker Spaniel, Barboncino Medio (10-15 kg)
M	30-35 cm	Border Collie, Setter, Dalmata (15-30 kg)
L	40-45 cm	Pastore Tedesco, Golden Retriever, Rottweiler (28-50 kg)
XL	50-55 cm	San Bernardo, Alano, Terranova (oltre i 50kg)

**Attenzione: le razze ed i pesi suggeriti sono puramente indicativi, per determinare la taglia del tutore prendere le misure come specificato.*



VANTAGGI

BT LIFE è formato da 2 dischi rigidi rivestiti da un doppio strato di materiale morbido ad alta densità. Questi dischi creano una compressione su entrambe le anche aumentando la temperatura corporea nella zona e riducendo quindi il dolore che il cane avverte a causa della patologia. Un utilizzo costante del tutore porta un benessere concreto nella vita del cane riducendo parte degli effetti della displasia.



CARATTERISTICHE

- ▶ Riduzione del dolore grazie alla compressione bilaterale delle anche.
- ▶ Tessuto traspirante.
- ▶ Ottima vestibilità.
- ▶ Lavabile a mano.
- ▶ Fasce e maniglie regolabili.



BALTO OFF-ROAD

CARRELLINO ORTOPEDICO
REGOLABILE PER CANI DISABILI



BALTO OFF-ROAD nasce per aiutare cani con difficoltà motorie o di deambulazione dovute a patologie o anzianità. Tra le maggiori patologie per le quali è indicato vi sono: displasia dell'anca, mielopatia degenerativa, grave artrosi agli arti posteriori, problematiche neurologiche e deficit alle articolazioni posteriori che impediscono al cane di sorreggersi autonomamente. Il carrellino è leggero, resistente e dotato di ottima stabilità, in quanto realizzato in alluminio anodizzato.

È realizzato in tre taglie regolabili in larghezza, in altezza e in lunghezza. Sulla parte anteriore sono presenti delle fasce di sicurezza che garantiscono un'ottima vestibilità sul cane. Sulla parte posteriore è presente un'imbracatura a "X" per permettere al cane di essere sorretto comodamente durante l'utilizzo. Inoltre l'imbracatura permette le deiezioni solide e liquide senza sporcare il carrellino (es. cani incontinenti). Balto Off-Road è fornito inoltre di un doppio invito per le zampe posteriori studiato per limitare lo stress e rilassare il proprio cane durante le passeggiate.




VANTAGGI
Il carrellino è pensato per far muovere il cane su qualsiasi tipo di terreno in quanto le ruote di gomma garantiscono un'ottima stabilità. È fornito completo di maniglia superiore che può essere agganciata in caso di necessità; questa permette al padrone di sorreggere il supporto in casi di gravi difficoltà motorie o per aiutare il cane a superare un ostacolo, come salire/scendere gradini o marciapiedi. Tutte le fasce di sicurezza sono rivestite in morbido e traspirante materiale Balto e sono lavabili a mano.



CARATTERISTICHE
▶ Leggero.
▶ Regolabile in tutte le direzioni.
▶ Resistente.
▶ Protezione fasce morbide, traspiranti e lavabili.

ISTRUZIONI PER PRENDERE LE MISURE
Dopo aver attentamente calcolato le misure A, B, C e pesato il cane, verificare la tabella.

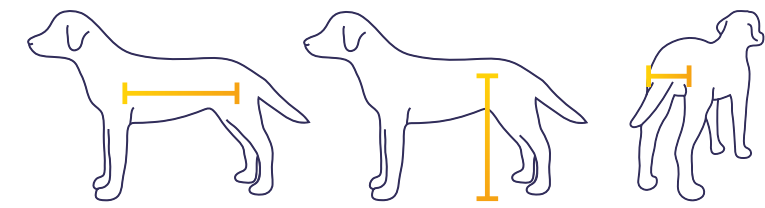

A - LUNGHEZZA
Centro spalla
Centro coscia

B - ALTEZZA
Misure dell'anca
a terra

C - LARGHEZZA
Misure il cane da
dietro in orizzontale

TAGLIE	A	B	C	PESO	RAZZE ESEMPIO*
S	22-32 cm	15-30 cm	10-20 cm	5-14 kg	Jack Russel
M	33-54 cm	31-51 cm	21-26 cm	15-26 kg	Cocker Spaniel
L	55-85 cm	≥ 50 cm	27-35 cm	27-50 kg	Pastore Tedesco

**Attenzione: le razze suggerite sono puramente indicative, per determinare la taglia del carrellino prendere le misure come specificato.*

ZAMPE

ZAMPE POSTERIORI

POSTERIORI



BT JUMP


TUTORE
PER GINOCCHIO



È un ausilio ortopedico studiato per casi di problemi al legamento crociato, di lussazione della rotula, di patologie dell'articolazione come artriti o artrosi, varismo e valgismo. Il tutore è ottimo anche come valida alternativa a un intervento chirurgico o come eccellente supporto post-operatorio. BT JUMP, con le sue tasche laterali munite di due stecche di alluminio angolate, limita il movimento dell'articolazione, ove necessario. La fascia addominale garantisce un'ottima stabilità del supporto. Il tutore, se usato senza stecche, è utile anche in caso di patologie come artriti o artrosi. Infatti l'effetto compressivo del materiale di cui è composto aumenta la pressione sanguigna nella zona, aumentando così la temperatura e riducendo di conseguenza il dolore provocato dalle patologie.

TAGLIE	CIRC. A	CIRC. B	H A-B	RAZZE ESEMPIO E PESI*
XXS	8-13 cm	3-5 cm	8 cm	Chihuahua, Volpino Di Pomerania (2-5 kg)
XS	16-18 cm	5-7 cm	10 cm	Jack Russel, Shih Tzu (5-10 kg)
S	21-25 cm	8-15 cm	15 cm	Cocker Spaniel, Barboncino Medio (10-15 kg)
M	26-31 cm	10-16 cm	18 cm	Border Collie, Setter, Pointer Inglese (15-30 kg)
L	29-34 cm	22-18 cm	22 cm	Pastore Tedesco, Golden Retriever, Rottweiler (28-50 kg)
XL	oltre 36 cm	-	25 cm	San Bernardo, Alano, Terranova (oltre 50 kg)

*Attenzione: le razze e i pesi suggeriti sono puramente indicativi, per determinare esattamente la taglia del tutore prendere le misure come specificato.

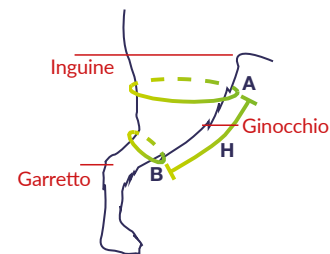

ISTRUZIONI PER PRENDERE LE MISURE

Misura A: Misurare la circonferenza della coscia a metà tra l'inguine ed il ginocchio del cane.

Misura B: Misurare la circonferenza della zampa del cane a metà tra il ginocchio e il garretto.

Misura H: Misurare la distanza tra la misura A e la misura B.



VANTAGGI

Garantire stabilità alla parte lesa, spesso vuol dire facilitarne la guarigione. Due stecche laterali di alluminio angolate inserite in apposite tasche limitano il movimento, qualora necessario, controllando la zona da tenere ferma. Inoltre il tutore è pensato per ridurre il carico sull'articolazione quando il cane cammina, aiutandolo quindi a sostenersi perfettamente. La fascia addominale tiene in sede il supporto evitando che scenda o ruoti.



CARATTERISTICHE

- Il tutore può essere utilizzato sia nel pre che nel post operatorio.
- Tessuto traspirante.
- Vestibilità.
- Lavabile a mano.
- Fascia accorciabile.

BT JUMP PLUS


TUTORE DOPPIO
PER GINOCCHIO



Patologie alle articolazioni delle ginocchia come lesioni ai legamenti crociati, problemi di lussazione della rotula, artriti e artrosi, varismo o valgismo richiedono soluzioni efficaci: il tutore doppio per ginocchio BT JUMP PLUS è la risposta a tutto questo. L'ausilio ortopedico è ottimo anche come valida alternativa a un intervento chirurgico o come eccellente supporto post-operatorio. Il tutore, se usato senza stecche, è utile anche in caso di patologie come artriti o artrosi. Infatti l'effetto compressivo del materiale di cui è composto aumenta la pressione sanguigna nella zona, aumentando così la temperatura e riducendo di conseguenza il dolore provocato dalle patologie.

TAGLIE	CIRC. A	CIRC. B	H A-B	RAZZE ESEMPIO E PESI*
XXS	8-13 cm	3-5 cm	8 cm	Chihuahua, Volpino di Pomerania (2-5 kg)
XS	16-18 cm	5-7 cm	10 cm	Jack Russel, Shih Tzu (5-10 kg)
S	21-25 cm	8-15 cm	15 cm	Cocker Spaniel, Barboncino Medio (10-15 kg)
M	26-31 cm	10-16 cm	18 cm	Border Collie, Setter, Dalmata (15-30 kg)
L	29-34 cm	22-18 cm	22 cm	Pastore Tedesco, Golden Retriever, Rottweiler (28-50 kg)
XL	oltre 36 cm	-	25 cm	San Bernardo, Alano, Terranova (oltre 50 kg)

*Attenzione: le razze e i pesi suggeriti sono puramente indicativi, per determinare la taglia del tutore prendere le misure come specificato.

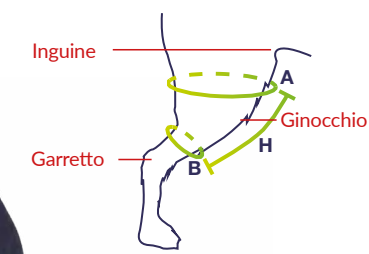

ISTRUZIONI PER PRENDERE LE MISURE

Misura A: Misurare la circonferenza della coscia a metà tra l'inguine ed il ginocchio del cane.

Misura B: Misurare la circonferenza della zampa del cane a metà tra il ginocchio e il garretto.

Misura H: Misurare la distanza tra la misura A e la misura B.



VANTAGGI

Garantire stabilità alla parte lesa, spesso vuol dire facilitarne la guarigione. Due stecche laterali di alluminio angolate inserite in apposite tasche limitano il movimento, qualora necessario, controllando la zona da tenere ferma. Inoltre il tutore è pensato per ridurre il carico sulla articolazione quando il cane cammina aiutandolo quindi a sostenersi perfettamente.



CARATTERISTICHE

- Il tutore può essere utilizzato sia nel pre che nel post operatorio.
- Tessuto traspirante.
- Vestibilità.
- Lavabile a mano.
- Fascia accorciabile.

BALTO LIGATEK

TUTORE DEL GINOCCHIO CON SNODO GRADUATO
PER LEGAMENTI CROCIATI E PATOLOGIE ROTULEE



CARATTERISTICHE

Utilizzo del tutore per ginocchio LIGATEK nel post-operatorio.

Grazie al tutore LIGATEK, l'articolazione del ginocchio può essere regolata in flessione-estensione o bloccata totalmente per preservare l'intervento chirurgico e permettere una corretta guarigione, riducendo lo stress ed il carico eccessivo. LIGATEK è indicato come supporto post-operatorio in caso di:

- incompetenza dei legamenti crociati craniale-caudale (interventi TPLO, TTA);
- interventi a carico della rotula (solcoplastica, trasposizione della cresta tibiale, frattura);
- tecnica extracapsulare;
- sintesi del legamento patellare.

Utilizzo del tutore per ginocchio LIGATEK come supporto conservativo in alternativa all'intervento chirurgico.

Il tutore LIGATEK può essere usato come supporto alternativo all'intervento chirurgico qualora il cane non fosse eligibile per altre opzioni (ad esempio a causa dell'età o per patologie pregresse). Grazie alla possibilità di ridurre il movimento pur mantenendo un R.O.M. adeguato, LIGATEK è indicata per il trattamento conservativo di:

- lesione e/o rottura del legamento crociato craniale e caudale;
- incompetenza traumatica od acquisita dei legamenti collaterali;
- trauma alla capsula articolare;
- lussazione rotulea.



ISTRUZIONI PER PRENDERE LE MISURE



Misura A

Misurare la circonferenza della coscia a metà tra l'inguine ed il ginocchio del cane.

Misura B

Misurare la circonferenza della zampa del cane a metà tra il ginocchio e il garretto.

Misura C

Misurare la distanza tra il ginocchio e la base del garretto.



TAGLIE	CIRC. A	CIRC. B	CIRC. C	RAZZE ESEMPIO E PESI*
S	21-25 cm	8-15 cm	11-14 cm	Cocker Spaniel, Barboncino Medio (10 -15 kg)
M	26-31 cm	10-16 cm	14-18 cm	Border Collie, Setter, Pointer Inglese (15-30 kg)
L	29-34 cm	12-18 cm	15-21 cm	Pastore Tedesco, Golden Retriever, Rottweiler (28-50 kg)
XL	Oltre 36 cm	-	16-23 cm	San Bernardo, Alano, Terranova (oltre 50 kg)

*Attenzione: le razze e i pesi suggeriti sono puramente indicativi, per determinare la taglia del tutore prendere le misure come specificato.

BT HOCK

TUTORE
PER GARRETTO



Dolore, zoppia, difficoltà motorie non preoccupano più: il tutore BT HOCK è la soluzione ideale per aiutare a risolvere le lesioni del garretto. Il tutore prevede tre tasche per l'inserimento di due stecche laterali rigide e di una stecca anteriore regolabile. È impiegato nelle patologie che provocano lesioni nella regione del garretto, causando sintomi come dolore, zoppia o difficoltà di movimento. Il tutore, se utilizzato senza stecche, è utile anche in caso di patologie come artriti o artrosi. Infatti, l'effetto compressivo del materiale di cui è composto aumenta la pressione sanguigna nella zona del garretto e, di conseguenza, la temperatura. Si riduce così il dolore provocato dalle patologie. La stecca anteriore è consigliata per quei casi in cui sia necessario bloccare completamente l'articolazione del garretto (ad esempio successivamente ad un'operazione, oppure a causa di problematiche neurologiche). Impiegato anche con funzione protettiva, può contenere cerotti o bende con eventuali medicamenti in caso di ferite chirurgiche o piaghe da decubito. **È eccellente anche dopo un intervento chirurgico.**

TAGLIE	PESO	RAZZE ESEMPIO*
XXS	2-5 kg	Chihuahua, Volpino Di Pomerania
XS	5-8 kg	Jack Russel, Shih Tzu
S	8-25 kg	Border Collie, Barboncino Medio
M	25-35 kg	Setter, Pointer Inglese
L	35-50 kg	Pastore Tedesco, Golden Retriever, Rottweiler
XL	Oltre 50 kg	San Bernardo, Alano, Terranova

*Attenzione: le razze suggerite sono puramente indicative, per determinare la taglia del tutore prendere come riferimento i pesi indicati.



VANTAGGI

Effetto stabilizzante e riduzione del carico: ecco come il tutore BT HOCK contribuisce a un pronto recupero funzionale prevenendo danni secondari. L'azione di tutoraggio migliora il lavoro dei legamenti attenuando il dolore; il minor carico allevia la parte lesa aiutando a ridurre il malessere e, in alcuni casi, la tumefazione. Il tutto senza impedire al cane i normali movimenti e garantendo un'ottima flessione e flessibilità dei muscoli, mentre i legamenti restano contratti. Le stecche rigide sono pensate per il bloccaggio dell'arto del cane all'altezza del garretto a seguito di un intervento chirurgico.




CARATTERISTICHE

- ▶ Tessuto traspirante.
- ▶ Vestibilità.
- ▶ Può essere utilizzato sia nel pre che nel post operatorio.
- ▶ Nel tutore sono già incluse le due stecche laterali rigide e la stecca anteriore regolabile.
- ▶ Le stecche possono essere tolte sfilandole dalle apposite tasche.
- ▶ La stecca anteriore è regolabile.



FLEXOR

TUTORE
PER TARSO

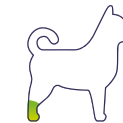

Tutore del tarso post operatorio e riabilitativo con snodo graduato per lesioni dei legamenti e patologie articolari. Il tutore BALTO FLEXOR nasce con lo scopo di stabilizzare l'articolazione del tarso del cane che presenti un'instabilità articolare traumatica o congenita. Può essere usato come supporto alternativo all'intervento chirurgico qualora il cane non fosse eligibile per altre opzioni (ad esempio a causa dell'età o per patologie pregresse).




VANTAGGI

Grazie alla possibilità di ridurre il movimento dell'articolazione, pur mantenendo un R.O.M. adeguato, FLEXOR funge da supporto riabilitativo.



CARATTERISTICHE

- ▶ Snodi regolabili.
- ▶ Regolabile sia in altezza che in lunghezza.
- ▶ Ottima vestibilità.

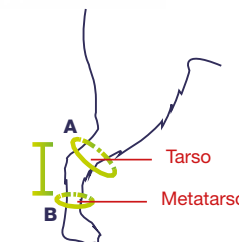

ISTRUZIONI PER PRENDERE LE MISURE

Con un metro da sarta misurare la distanza tra il centro del tarso A e la base del metatarso B.



TAGLIE	LUNGHEZZA A-B	PESO	RAZZE ESEMPIO*
XS/S	8-10 cm	10-15 kg	Barboncino medio, Shiba Inu, French Bulldog maschio
M/L	10-14 cm	15-45 kg	Pastore Tedesco, Border Collie, Labrador, Golden Retriever
XL/XXL	14-18 cm	oltre 45 kg	San Bernardo, Alano, Maremmano

*Attenzione: le razze e i pesi suggeriti sono puramente indicativi, per determinare esattamente la taglia del tutore prendere le misure come specificato.

BALTO LINK

TUTORE PER IL CONTROLLO DELLE ZAMPE POSTERIORI



Balto Link è un tutore progettato per controllare e limitare l'apertura delle zampe posteriori del cane tramite una fascia regolabile in lunghezza. Viene utilizzato in caso di patologie come la sindrome del cucciolo nuotatore (quando il cane tende a spalancare le zampe posteriori a 180°) e patologie neurologiche. È utile inoltre come supporto post-operatorio all'anca o al bacino e nelle fasi di riabilitazione. Il tutore è formato da materiale morbido, traspirante e antibatterico grazie alla fibra di argento presente al suo interno.



L'utilizzo di questo tutore si rende necessario in caso di:

- Sindrome del cucciolo nuotatore (il cane tende a spalancare le zampe posteriori a 180°);
- Problemi neurologici;
- Debolezza muscolare;
- Supporto post operatorio a seguito di fratture pelviche o femorali;
- Come supporto alla riabilitazione a seguito di un intervento chirurgico all'anca o al bacino.



VANTAGGI

Balto Link è un supporto importante per il controllo e la stabilità motoria dell'animale. Contribuisce ad un recupero funzionale del movimento, limitando gli effetti di patologie neurologiche e ortopediche. Grazie al materiale in fibra di argento a diretto contatto con le zampe, il cane godrà di comfort e sarà protetto da batteri. L'argento infatti ha notoriamente delle proprietà antibatteriche. Le molecole del metallo agiscono come inibitori riducendo il rischio di proliferazione di batteri.



CARATTERISTICHE

- Tessuto Traspirante.
- Antibattericità (solo nella zona coperta dal tutore).
- Vestibilità e comodità.
- Lavabile a mano.
- Interamente regolabile.





NOTE

- Il tutore deve essere chiuso ben stretto attorno alle zampe del cane, per evitare che lo stesso possa scivolare e/o ruotare.
- Il tutore è lavabile solo a mano.
- Tenere pulite le parti velcrabili da peli o sporcizia.
- Il cane deve essere supervisionato durante l'uso del tutore.
- **Non tenere il tutore addosso al cane tutto il giorno.** Si consiglia di utilizzarlo un paio d'ore la mattina e un paio d'ore il pomeriggio, rimuovere durante la notte.
- Il tutore non è un presidio medico, l'antibattericità è limitata alle proprietà naturali del materiale e solo nelle zone a diretto contatto con esso. **Il prodotto quindi non sostituisce eventuali farmaci e/o terapie previste dal veterinario.**



PROPRIETÀ DELLA FIBRA DI ARGENTO

La fibra d'argento è formata da uno strato di argento puro unito alla superficie di una fibra tessile. Si tratta di un processo tale da consentire alla fibra, unita all'argento in modo permanente, di mantenere le sue tradizionali caratteristiche tessili e la sua consistenza tattile. Le proprietà antimicrobiche inibiscono la formazione di cattivi odori. Questi tessuti in argento hanno capacità conduttive; proteggono dalle radiazioni delle onde elettromagnetiche formando uno scudo protettivo.

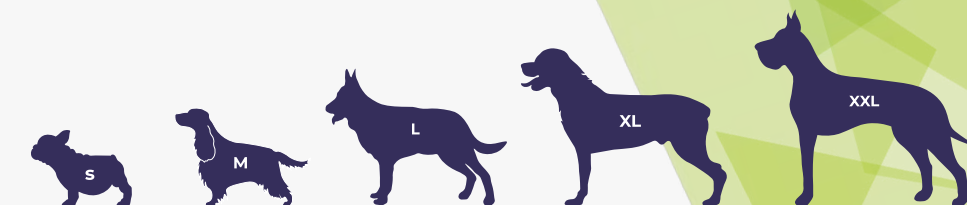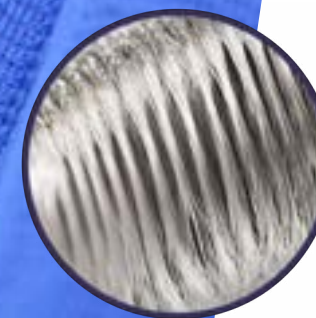

TAGLIE	PESO	RAZZE ESEMPIO*
S	4-12 kg	Bulldog Francese, Volpino Italiano, Shih Zu
M	13-22 kg	Border Collie, Cocker Spaniel, Barboncino Medio
L	20-45 kg	Pastore Tedesco, Golden Retriever, Weimaraner
XL	46-60 kg	Rottweiler, Leonberger, Cane Corso
XXL	60-100 kg	San Bernardo, Alano, Mastino Napoletano

*Attenzione: le razze suggerite sono puramente indicative, per determinare la taglia del tutore prendere come riferimento i pesi indicati.

BT PULL

TUTORE PER IPERFLESSIONE DELLE FALANGI



Il tutore è utile in caso di patologie neurologiche che causano gravi deficit propriocettivi per cui il cane non riesce a percepire la posizione del suo arto sul terreno, tendendo quindi ad appoggiare la zampa sul dorso (dorsoflessione).

BT PULL è utile anche a seguito di danni al nervo sciatico (per esempio a seguito di una frattura del bacino o del femore), allo scopo di evitare che dal problema neurologico si crei un danno ortopedico di accorciamento dei tendini flessori del piede.



VANTAGGI

L'applicazione del tutore permette: la correzione dell'appoggio errato dell'arto; uno stimolo continuo e corretto delle vie nervose propriocettive, anche durante la camminata; uno stretching costante delle dita del piede e quindi dei tendini flessori delle dita, evitando così l'accorciamento di questi.



CARATTERISTICHE

- ▶ Tessuto traspirante.
- ▶ Vestibilità.
- ▶ Lavabile a mano.
- ▶ Nella confezione è presente un rinforzo realizzato con materiale spesso da applicare nei gravi casi di iperflessione delle falangi, che permette una migliore apertura delle stesse anche per i cani di grossa taglia. Il rinforzo può essere sfilato qualora non necessario.

TAGLIE	PESO	RAZZE ESEMPIO*
XXS	2-4 kg	Misura per Gatti e Chihuahua
XS	5-10 kg	Jack Russel, Shih Tzu
S	10-20 kg	Border Collie, Barboncino Medio
M	20-40 kg	Labrador, Dalmata
L	oltre 40 kg	Pastore Tedesco, Golden Retriever

**Attenzione: le razze suggerite sono puramente indicative, per determinare la taglia del tutore prendere come riferimento i pesi indicati.*

BT SPLINT

TUTORE PER LASSITÀ DEL TARSO



È studiato per sostenere l'articolazione radio-carpica, carpo-metacarpica e tarso-metatarsica, sia delle zampe anteriori che di quelle posteriori. Per cani che soffrono di patologie come: iperestensione o iperflessione del carpo o del tarso, distorsioni legamentose, stiramenti, infrazioni ossee di lieve entità risolvibili qualora il trattamento conservativo sia preferibile all'intervento chirurgico. Nel caso di utilizzo sulla zampa anteriore, consigliamo anche BT JOINT, in quanto il suo impiego sulla zampa sana aiuterà il cane a compensare meglio il carico che la stessa deve sopportare a causa del deficit dell'altra zampa. Se BT SPLINT è utilizzato per la zampa posteriore, consigliamo l'utilizzo di BT JOINT per entrambe le zampe anteriori. Una volta montato il tutore attorno alla zampa del cane non è necessario che i 2 bordi bianchi siano chiusi attorno alla zampa fino a toccarsi, in quanto **la chiusura del tutore è determinata dalle fasce blu e l'azione di tutoraggio è data dalla stecca presente nella parte posteriore del tutore.**



VANTAGGI

Efficacia, praticità, ergonomia: il tutore per lassità BT SPLINT riunisce tutto questo. La stecca metallica in resistente materiale modellabile inserita all'interno del tessuto, segue la parte posteriore dell'avambraccio fino ad accogliere il cuscinetto plantare stabilizzando l'area interessata e permettendo al cane un buon movimento. Ideale anche come protezione per bendaggi inseriti all'interno, permette tempi di recupero più rapidi.



CARATTERISTICHE

- ▶ La taglia XXS e XS va bene anche per i gatti.
- ▶ Stecca metallica in resistente materiale modellabile.
- ▶ Il tutore può essere utilizzato sia nel pre che nel post operatorio.
- ▶ Tessuto traspirante.
- ▶ Vestibilità.
- ▶ Lavabile a mano.
- ▶ Nel tutore è già inclusa la stecca.



NOTE

- ▶ Il diretto contatto con il terreno può danneggiare il tutore, quindi per garantirne l'integrità, durante l'utilizzo è necessario proteggerlo facendo indossare al cane anche una scarpetta o una calza protettiva, acquistabile in qualsiasi negozio di animali.

TAGLIE	PESO	LUNGHEZZA A-B	RAZZE ESEMPIO*
XXS	fino a 2 kg	9,5 cm	Chihuahua, Volpino Di Pomerania
XS	fino a 5-7 kg	13 cm	Jack Russel , Shih Tzu
S	fino a 15 kg	16 cm	Cocker Spaniel, Barboncino Medio
M	fino a 25-30 kg	22 cm	Border Collie, Setter, Pointer Inglese
L	oltre 30 kg	30 cm	Pastore Tedesco, Golden Retriever, Rottweiler

**Attenzione: le misure del peso sono puramente indicative, alcune razze possono non coincidere con le taglie indicate, pertanto fare anche riferimento alle dimensioni del tutore per la scelta corretta. Se utilizzato per le zampe posteriori, scegliere la taglia inferiore rispetto ai pesi indicati (ad esempio: se il cane pesa 27 kg, per la zampa anteriore scegliere la taglia M, per la zampa posteriore scegliere la taglia S).*




ACCESSORI

ACCESSORI

BT BLUE CARPET

MATERASSINO
ORTOPEDICO

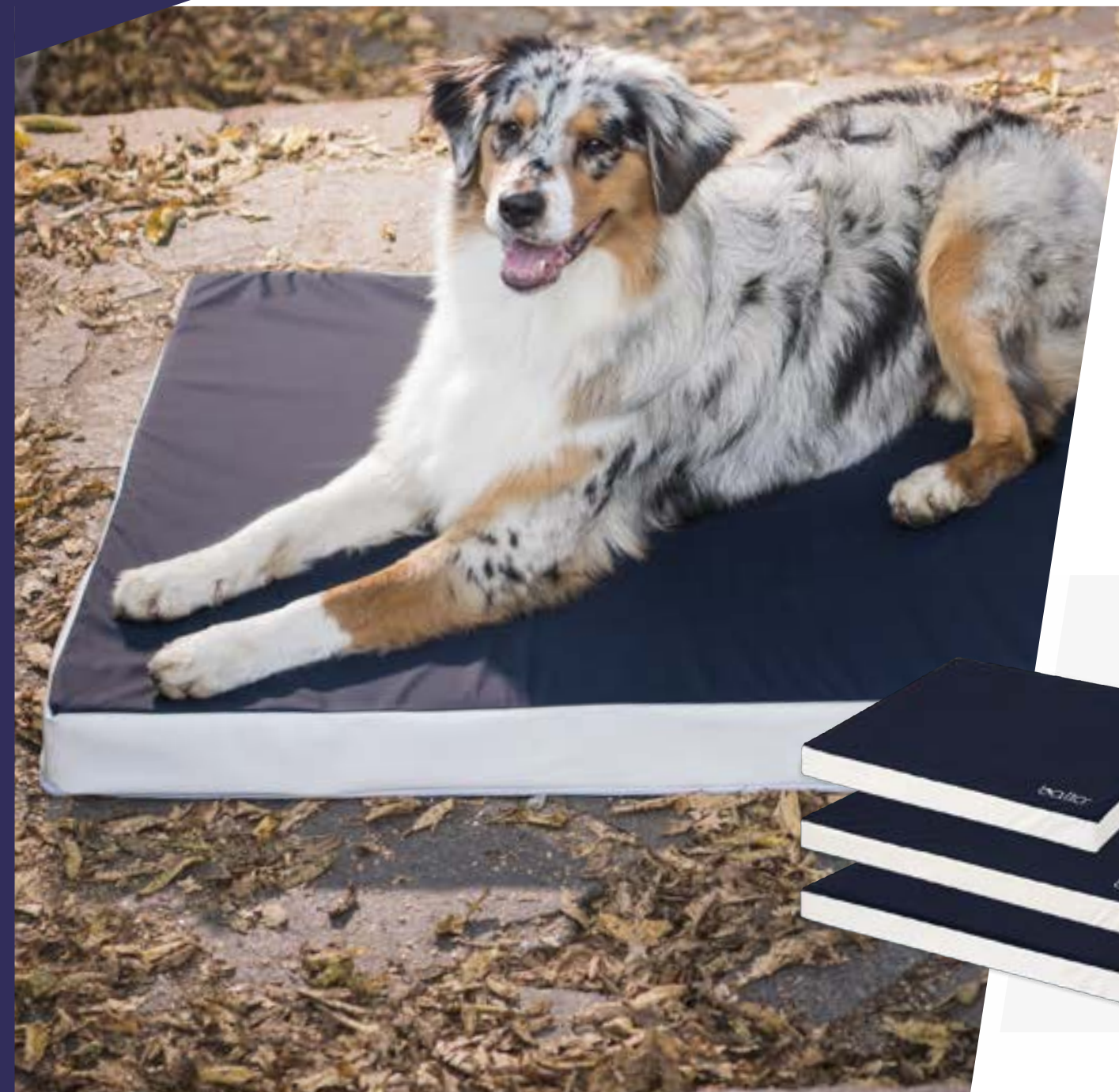

Il materassino BT BLUE CARPET nasce per i cani anziani e per cani che soffrono di piaghe da decubito. Il materassino è realizzato in materiale traspirante memory foam, le cui proprietà (come nell'uomo così anche nel cane):

- garantiscono un corretto riposo notturno;
- favoriscono la circolazione vascolare e linfatica, aiutando il ripristino della stessa;
- migliorano la postura dell'animale.

È adatto inoltre per i cani che soffrono di piaghe da decubito in quanto rallenta la progressione delle stesse, migliorando la guarigione in associazione alla terapia prevista dal proprio veterinario. **Viene impiegato inoltre a seguito di interventi chirurgici come materassino da riposo.**

TAGLIE	DIMENSIONE
M	80 x 70 x 7 cm
L	100 x 70 x 7 cm
XL	120 x 80 x 7 cm



CARATTERISTICHE

- Il materassino è completamente sfoderabile e lavabile a mano.
- La fodera è realizzata in materiale traspirante e impermeabile, che ne garantisce una facile pulizia anche nei casi in cui il cane sia incontinente.

NO FLAP® PROTECT

SUPPORTO PROTETTIVO
PER LE ORECCHIE



Il supporto è progettato per proteggere le orecchie del cane, permettendo la guarigione durante il periodo di recupero. Il **materiale blu denim** è completamente traspirante e impedisce infezioni o scottature causate da raggi UV durante l'estate.



VANTAGGI

Può essere utile sia nel pre che nel post operatorio permettendo la guarigione della ferita.




CARATTERISTICHE

- Utile nel caso di ematomi, tagli, infezioni o comportamenti ossessivi compulsivi.
- Protegge i canali auricolari da spighe e/o altre piante che possono entrare in contatto con le orecchie del cane.
- Può essere utile sia nel pre che nel post operatorio permettendo la guarigione della ferita.
- Realizzato in tessuto denim per proteggere l'area da dai raggi UV o dalle alte temperature.
- Disponibile sia per cani che per gatti.
- È lavabile sia a mano che in lavatrice (massimo 30°), rimuovendo le stecche in plastica prima del lavaggio.

TAGLIE	MISURA A	MISURA B
XS	13-18 cm	25-36 cm
S	15-20 cm	33-43 cm
S/M	18-23 cm	38-48 cm
M	20-25 cm	43-56 cm
L	25-30 cm	46-58 cm
XL	oltre 30 cm	oltre i 53 cm

*Attenzione: per determinare la taglia del tutore prendere le misure come specificato.

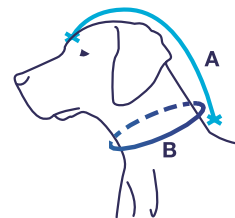

ISTRUZIONI PER PRENDERE LE MISURE

Misura A: Misurare la distanza dal centro degli occhi alla base del collo.

Misura B: Misurare la circonferenza del collo con un metro da sarta.



RECOVA SHIRT

MAGLIETTA POST-OPERATORIA
ANTILECCAMENTO



Il prodotto è pensato per proteggere le ferite (anche dopo un intervento chirurgico) dal leccamento o da contatto. È utile nel caso di comportamenti ossessivo compulsivi. Il materiale elasticizzato e traspirante avvolge il tuo amico a 4 zampe creando una sensazione di benessere, aiutandolo a ridurre lo stress durante il periodo di recupero. Le fasce vicino le parti intime possono essere piegate per lasciare il tuo cane/gatto libero di fare i propri bisogni in totale libertà.




CARATTERISTICHE

- Favorisce la guarigione dopo un intervento e protegge le aree sensibili dell'animale.
- Ideale per problemi alla pelle e per l'incontinenza.
- Riduce lo stress nel periodo di recupero.
- I fori anteriori si adattano alle zampe grazie al tessuto elasticizzato.
- La parte posteriore può essere facilmente aperta e piegata per lasciare il tuo amico a 4 zampe libero di fare i bisogni.
- Lavabile in lavatrice (MAX 30°).
- Disponibile sia per cani che per gatti.

TAGLIE	MISURA A-B	MISURA C	RAZZE DI ESEMPIO*
XXS	21-24 cm	26-29 cm	Gatti, Toy
XS	25-29 cm	30-34 cm	Chihuahua, Barboncini Toy
S	25-33 cm	45-53 cm	Bichon Frise, Jack Russel Terrier
M	35-43 cm	56-68 cm	Border Terrier, Pechinese
L	45-53 cm	63-79 cm	Border Collie, Schnauzer Nano
XL	53-61 cm	66-81 cm	Labrador, Husky, Boxer
XXL	74-86 cm	84-99 cm	Golden Retriever, Pastore Tedesco, Rottweiler
XXXL	84-94 cm	99-112 cm	San Bernardo, Terranova, Alano

*Attenzione: le razze suggerite sono puramente indicative, per determinare la taglia del tutore prendere le misure come specificato.

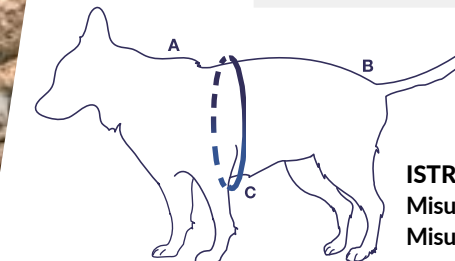

ISTRUZIONI PER PRENDERE LE MISURE

Misura A-B: Misurare dalla base del collo fino alla base della coda.

Misura C: Misurare la circonferenza del torace dietro le zampe anteriori.





Scopri tutte le novità del mondo Balto

www.tutoribalto.com

SCARICA IL MATERIALE INFORMATIVO


Avrai sempre a disposizione tutte le informazioni necessarie per scegliere il tutore più idoneo al problema da risolvere.

VIDEO ISTRUZIONI

Nella pagine dei singoli prodotti troverai un video in 2 lingue che ti guiderà e ti darà informazioni utili per il benessere del tuo cane.

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Riceverai notizie utili, curiosità e descrizioni di prodotti Balto.

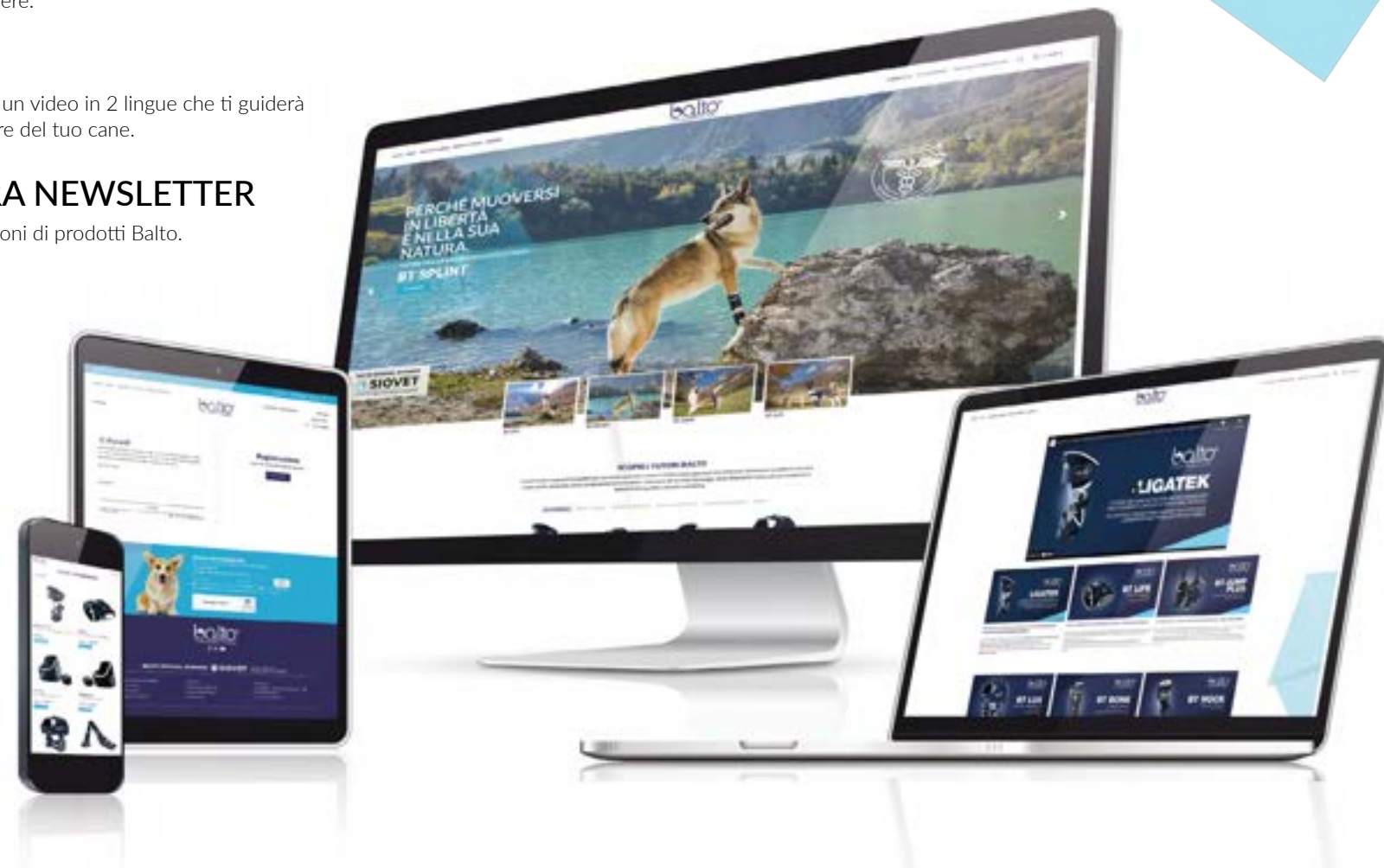



JOYVET srl
Sede Legale:

Via dell'Artigianato 4/A
37062 Dossobuono (Verona)

T +39 045 8619327

F +39 045 8619327

E info@tutoribalto.com

www.tutoribalto.com



Questi prodotti sono
destinati **solo alla vendita**.

Il noleggio è severamente vietato.

A causa della normale usura,
un tutore già impiegato su un
altro animale perde la sua efficacia.